



分離したアーチパイプを連結する

梱包時のアーチパイプは2パーツに分離しています。また、予め内部に配線を通し済みです。
まずは、アーチパイプの連結を行って下さい

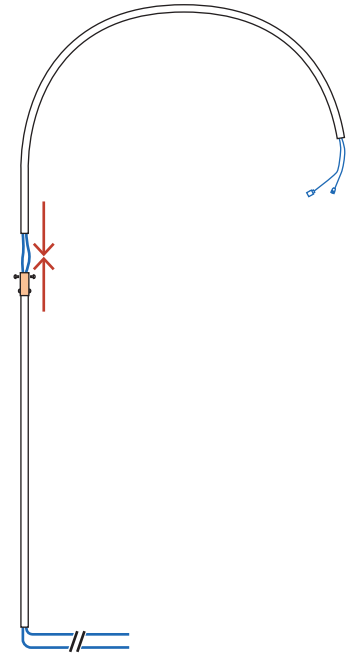


連結時の注意点

穴の向きを合わせて差し込む

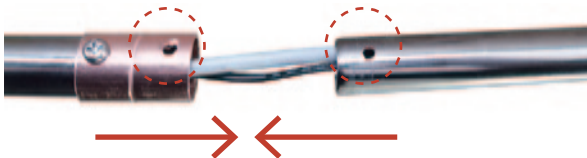


内部に配線が通っていますので、
噛まないように注意して下さい。

穴の位置が重なっている事を確認して、
2カ所をネジ止めします。

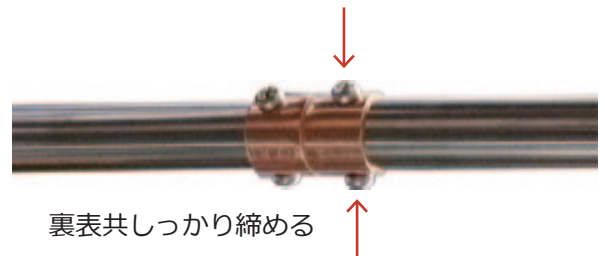

裏表共しっかり締める

確認

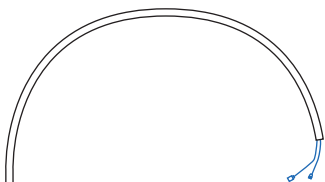


しっかり連結出来ているか確認下さい。
ぐらつきが無い、連結部で引き抜けないか。

連結した状態として、
引き続きベッドへの設置作業を進めて下さい。

※分離させる（省スペースに片づけ・梱包されたい場合）

アーチパイプの連結の逆手順で再び分離出来ます。

2カ所のネジを緩め外します。
(外したネジは再び連結する際に使用。一緒に保管下さい。)

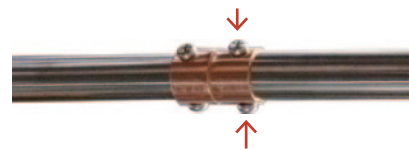

内部の配線を傷めないように、
余裕持たせてパイプを引き抜きます