

介護ベッド用テレビ「アーチ」 ベッドへの取付方法


安全の為、設置作業の一番最後に電源・アンテナ出力へ接続下さい。

1. アーチパイプに上・下クランプを加える

まず、「**上クランプ（受を下に）**」へアーチパイプ内部を通るケーブル2本の内、最初に**(A) 細い方「電源延長」**から先に通し、次に**(B) 太い方「アンテナ」**、の順に通して、最後に「**アーチパイプ**」を通します。

↓
上クランプにアーチパイプが完全に通れば、同様手順で「**下クランプ（受を上）**」にも通します。

※クランプは上下共に形状は同一です。

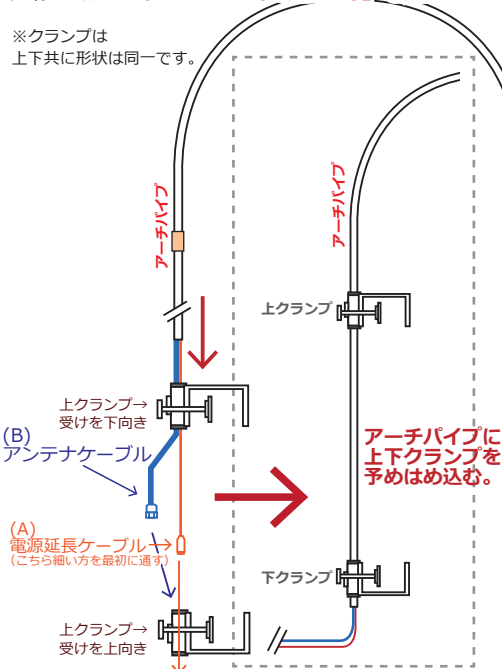


2. ベッドへ取り付ける


ベッド頭側ヘッドパネルの上中央へ、上クランプ部をはめ込みます。

↓
位置が決まれば、各グリップボルトを軽く締めて、次に下クランプを引き上げてヘッドパネル下側にはめ込みます。


↓
アーチパイプがベッド中央に垂直になっているか確認し、上下クランプの全てのグリップボルトをしっかりと締めて下さい。

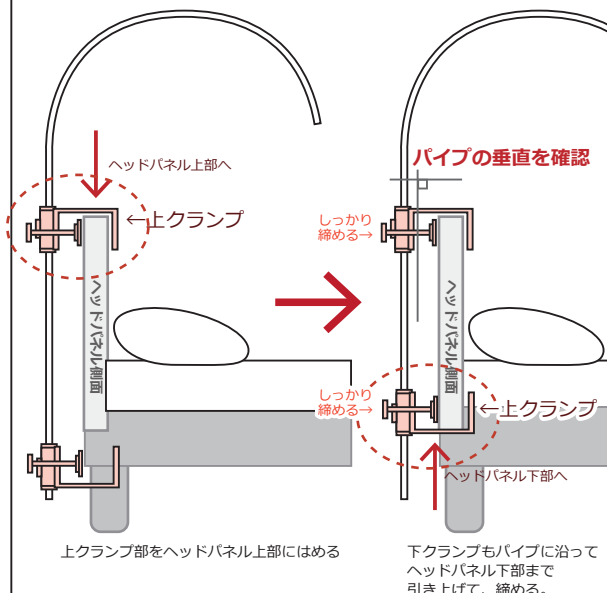


ベッドの頭側ヘッドパネルへ手順に従い設置した写真例

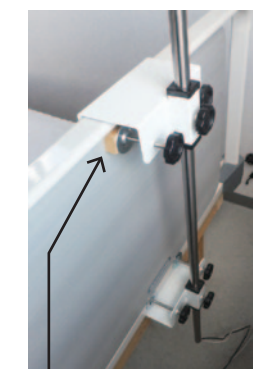

ホルダー用スペーサー（当て木）について
場合により、パイプが垂直になるよう、及びクランプの押さえが傾かないよう、スペーサーを使用します。

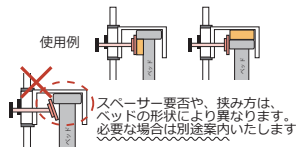

3. アーチパイプへテレビ取付

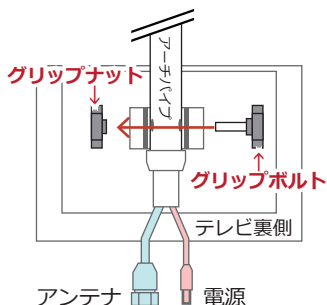

≪写真例≫

←テレビ接続
グリップボルト用の穴

「アーチパイプ先端側面の穴」に「テレビ裏側の取付部」を穴の位置を合わせてグリップボルトを通してテレビを取付けます。

1. **グリップボルト**をしっかりと奥まで通す。

2. 反対の穴から出てきたボルトに**グリップナット**をはめて、両側からしっかりと締める。

※安全の為しっかりと締める ※ボルトを通す穴は左右どちら側でも可

4. テレビへの配線接続

アーチパイプ内を通る、電源ケーブル・アンテナケーブルをそれぞれ**テレビの端子へ接続**下さい。


その他、配線類「映像入力」「イヤホン」などは必要に応じて任意で用意・接続下さい。

※アーチパイプに沿わせるには外側に配線下さい。（結束バンドなど）

5. アンテナ・電源ケーブルを出力端子へ接続

最後の工程で、パイプから出ているケーブル（電源・アンテナ）を部屋の壁などにある出力端子へ接続下さい。

※アーム先からケーブル長さ約90cm有りますが、長さが足りない場合は電源・アンテナの各延長ケーブルを用意下さい。

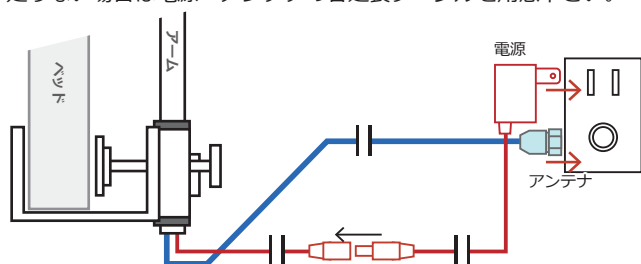

⑥最終確認・設置完了

ベッドにしっかりと設置出来ているか、テレビの初期設定を行い放送受像が行えるかご確認ください。問題なければ設置完了です。



■ 取扱注意事項

アーチパイプ部に強い力をかけないで下さい。
折れたり、変形する可能性があります。
（起き上がる時の支えに持つ、物をぶら下げるなど）