



# ピタッとアームへ歯科医院向けライトを取り付ける

## ① ピタッとアーム先端にホワイトニング用ライトをはめ込みます

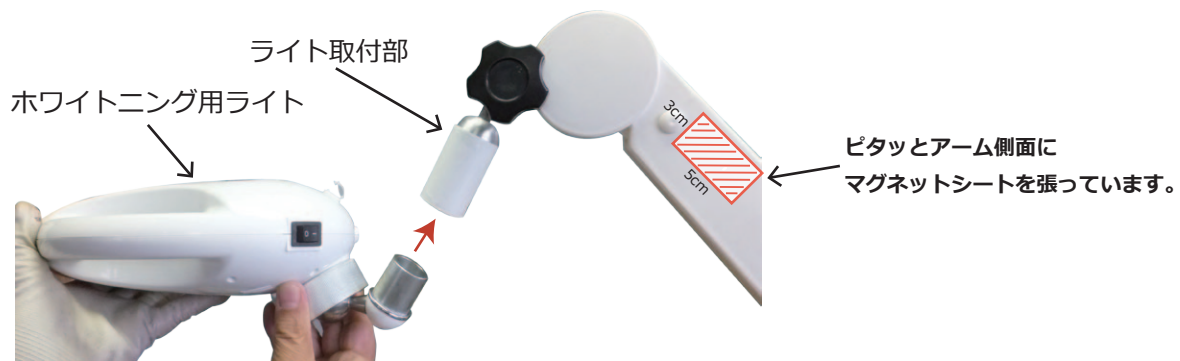

出荷時点でアーム先端には予めアーム側に「ライト取付部」を取付けています。  
写真の様に下部の穴にライトをしっかり奥まではめ込みます。

## ② ネジ穴の位置を合わせて、上下2か所ネジを締める

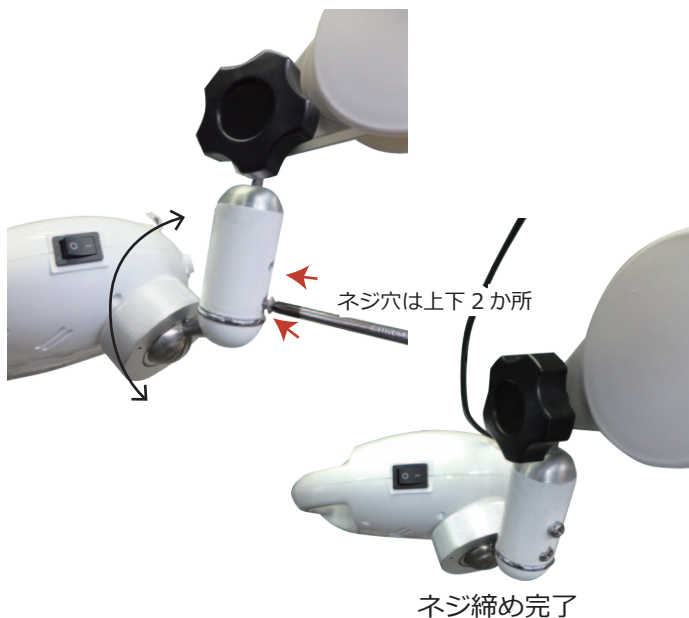

ライトを回して、ライトのネジ穴とアーム内側のネジ穴の位置を合わせます。  
上下のネジ穴へネジでそれぞれ締めてください。

2か所のネジを締めれば、  
アームからライトが外れなくなります。

## ③ 電源ケーブルをケーブルフックに通す



ライトの電源ケーブルを  
ライト上面のケーブルフックに通して  
広がらない様にまとめる。

以上で、  
ピタッとアームへライト設置完了です。