


取付金具ユニバーサルクランプをベッドに取り付ける

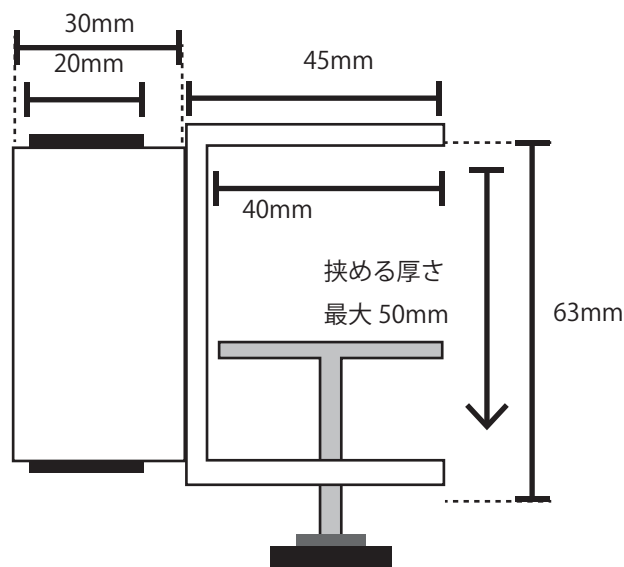

取付先の挟める厚さは最大 50mm、奥行 40mmとなります。

①ユニバーサルクランプを取付先に挟み込みます。




ユニバーサルクランプが水平になるよう挟み込み、
下側のボルトをしっかりと回し締めてください。

②よりしっかりと取付を行うため、2箇所を木ネジで締めます。

※取付部にネジの穴があきます。

木ネジで固定します。

木ネジ 2 本はユニバーサルクランプに同梱しています。

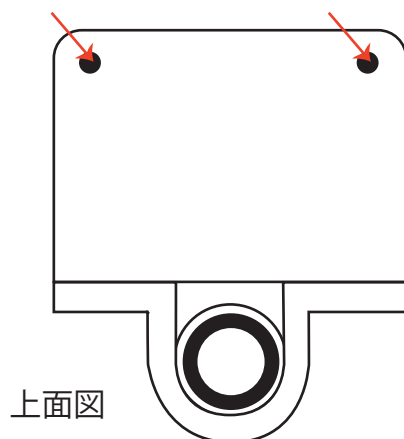

長期間、安定・安全にご使用いただく為
木ネジを使用し固定をオススメいたします。