


ピタッとアーム タブレット端末取付金具 取付方法

①梱包状態から、輪ゴム・緩衝材・ビニタイを外します。
支えながらゆっくりとアームを広げてください。


②ベッドへ設置した取付金具へアームを取付け

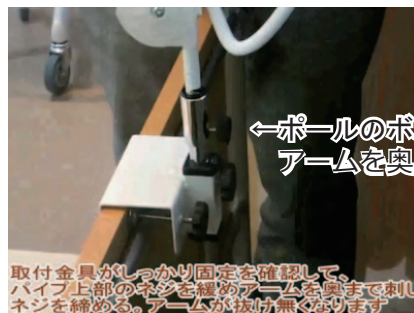


取付金具の上部の穴にアームを奥まで差してボールのボルトを締める。締めるとアームが抜けなくなります。

③アームに取付ホルダーを取り付ける

ご希望の端末向きに合わせて、吊金具の回転を調整して、アームに設置下さい。

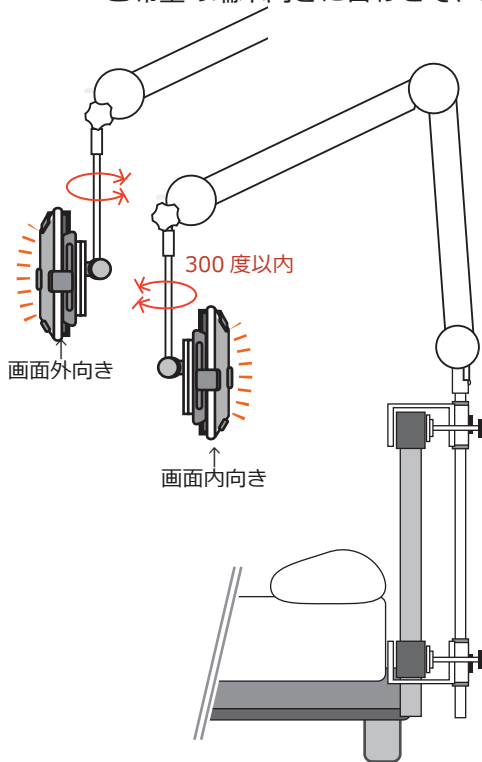

吊り金具は 300 度以内だけ回転出来ます。
使用する画面向きを中心に十分に回転するように調整

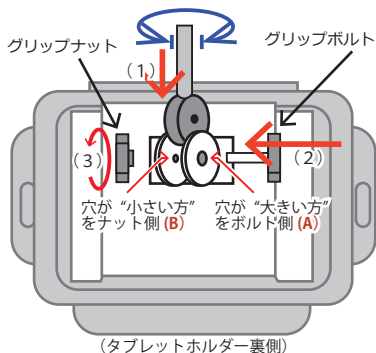

サンワサプライ製 VESA 取付けホルダーに予めアーム用取付金具が取り付けられています。

- (1) アーム先端を取付ホルダー部分にはめます。
※ホルダー・アーム側のそれぞれの穴が貫通位置へ
- (2) 取付穴の大きい側 (A) からグリップボルトを奥まで差して、穴が小さい方 (B) はネジ穴ですので、しっかりと、きつく、最後まで締めてください。

《注意》先にグリップナットをきつく締めてしまうと、ホルダーがしっかりと固定出来なくなります。

- (3) 最後まで締めたボルトが緩まないように、グリップナット側を締めます。

ボルト・ナット側共、限界までしっかりと締めてください。
より力が入るよう「手袋」の使用を推奨。

④取付完了



「取付ホルダー」「タブレット端末」がしっかりと取付できているか確認できれば、取り付け作業完了です。

タブレット端末の取り外す際は、
端末を支えて落下しないように注意して下さい。

取付金具について、タブレットはめ込み方法の詳細については別紙の説明書も参照下さい。