



取付完了図




①ベッドにクランプを取付けます。



1. ベッド手すり等にクランプを取り付けます。
2. 手すりの形状に合わせ、下図のように奥まではめ込み取付用ボルトを閉めます。




②クランプにプラスチックアームを取付けます。

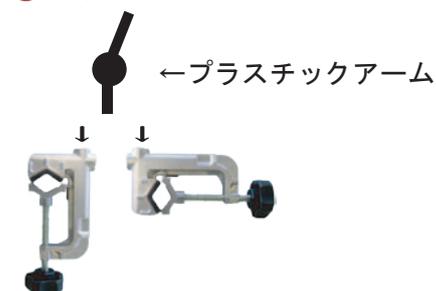

1. クランプの取付方向に合わせ、プラスチックアームをクランプに差し込みます。

③アームの先にミラーを取付ます。

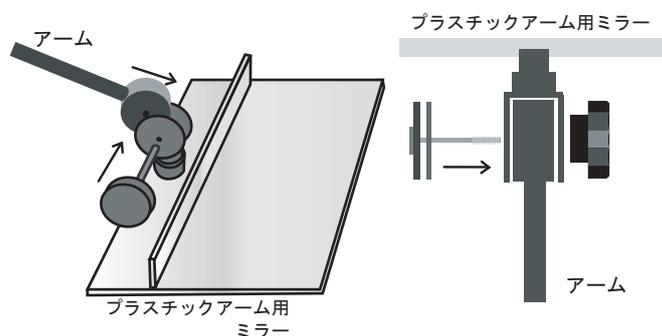

※固定した状態でアームにミラーを取付ます。

1. 「アームの先」と「ミラーの取付部分」を合わせます
2. 合わせた箇所中央の穴にボルトを挿入し、回して閉めます。

以上でアーム式ミラーの取付の完了です。